

Geçici Ağz Burun Koruma Maskesi İçin Dikiş Kılavuzu

1. Pandemi (Salgın) Durumunda Geçici Ağz Burun Koruma Maskesi (BMNS)

Bu ağz koruma maskesi tamamen kişiler tarafından üretilmiştir, ne test edilmiş ne de sertifikalandırılmıştır. Bir Pandemi (salgın) durumunda sertifikalı tek kullanımlık MNS (ağz burun koruma maskeleri) artık mevcut değilse, geçici BMNS sadece alternatif olarak kullanılır.

Üretim ve kullanım, dikkatle değerlendirildikten sonra sizin sorumluluğunuzdadır.


BMNS takan kişiler, damlacıkların yayılmasını azaltmayı amaçlamaktadır (**hasta koruması / karşılıklı koruma**). Dolayısıyla bu ürün **tam koruma sağlamaz** ve koruma etkinliği kullanılan kumaşın kalınlığına bağlıdır. Kaynamaya dayanıklı dokumasız kumaşa ilave astar eklenmesi, etkinliği önemli ölçüde artırabilir.

Corona virüs damlacıkları, örn. konuşma, öksürme veya hapşıрма esnasında ortaya çıkıp temas ettiği kişilerin mukoza zarlarına yerleşerek bulaşırlar. Corona virüs damlacıkları ayrıca yüzeylerde bulaşabilir. Virüs içeren yüzeylere temas etmiş olan eller aracılığıyla da el, ağz veya buruna dokunulduğunda Corona virüslerinin bulaşması söz konusu olabilir.

BMNS takmak, mümkün olduğunca bir Corona-Enfeksiyonunun yayılma yollarını azaltabilir. Aslında risk altındaki insanlarla her görüşmede, görüştüğünüz kişilere damlacıkların dağılmasını önlemek için geçici ağz burun koruma maskesi (BMNS) kullanılmalıdır.

Bir Pandemi (salgın) durumunda halka yeterli BMNS tedarik etmek ve kişiler tarafından dikilebilir, yıkanabilir geçici bir ağz burun koruma maskesi dikiş talimatları sırasıyla aşağıda oluşturulmuştur.

2. Yıkabilir geçici ağız burun koruma maskesi için dikiş talimatları

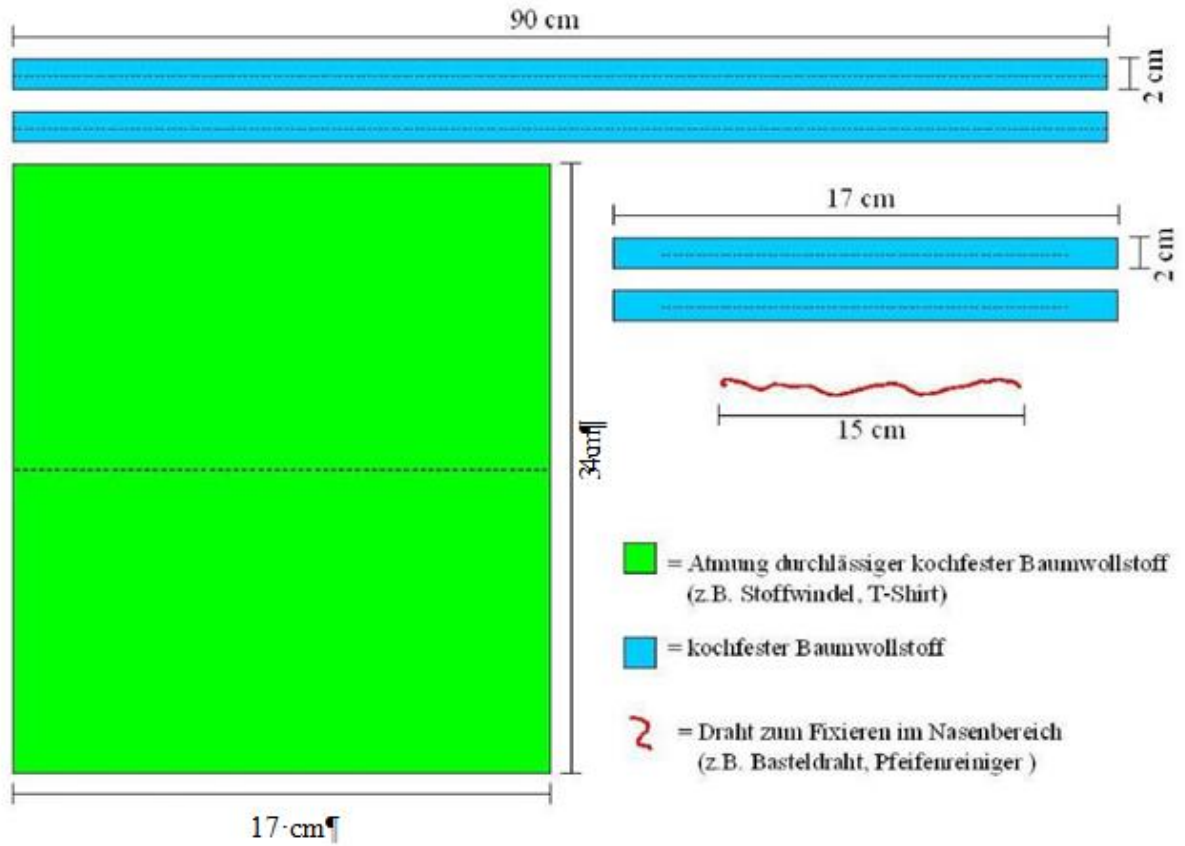


Sırasıyla gerekli olan malzemeler:

- İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
- İki adet 17 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
- 15 cm uzunluğunda ince ve bükülebilir bir tel (örneğin Zanaat Teli, Pipo temizleyicisi- Şönil, Poşet ağız bağlama teli)
- 17 cm x 34 cm büyüklüğünde, hava (nefes) geçirgen, kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaştan yapılmış bez (örneğin Bez olanından çocukbezi, Tişört kumaşı, Hafif pamuklu bez)


Hava (nefes) geçirgenlik testi:

- İki kat bez alın
- Ağız ve burun çevresinden sıkıca kapatın
- Nefes alın ve nefes verin

Nefes alıp vermede büyük bir zorlukla karşılaşmıyorsanız, o malzeme kullanım için uygundur.

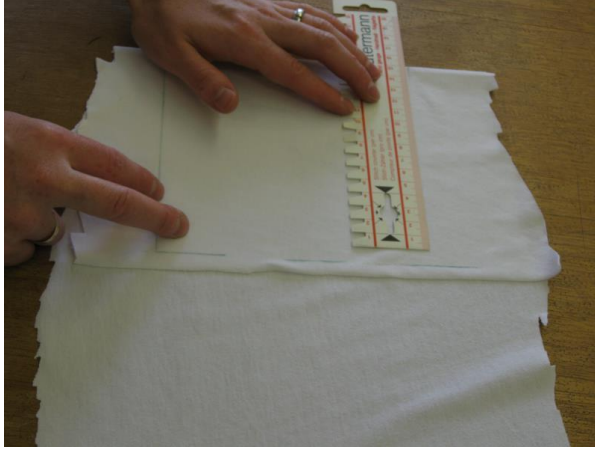


Bezi 17x34 cm olarak
işaretleyin ve kesin.

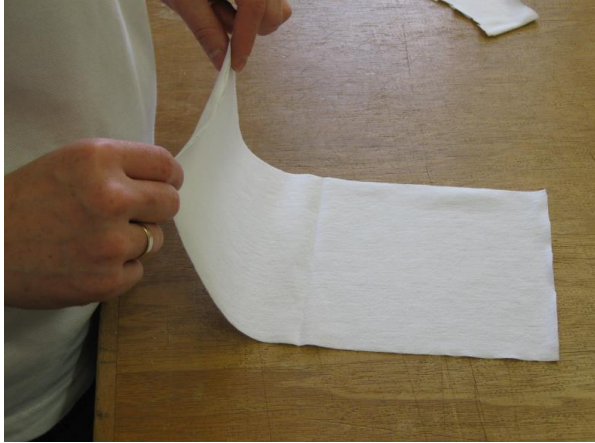

Bezi ikiye katlayın ve ütöleyin.



Bezi üç eşit parçaya kıvrım yapın
ve ütöleyin (kıvrım derinliği 1,3 cm).

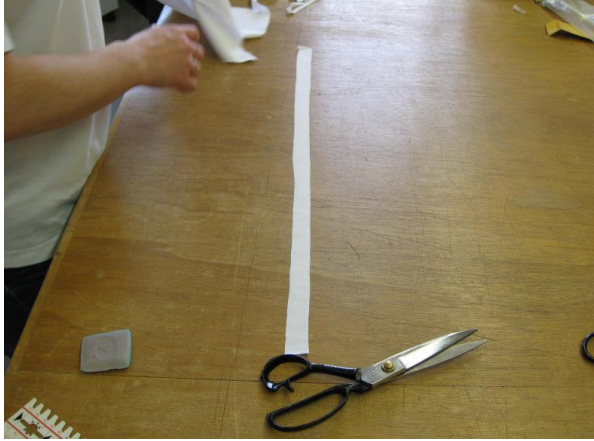


İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde (baş bantları) ve iki adet 17 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde (kenar takviyesi) pamuklu kumaştan kesin. Kesim iplerini temizleyin.

Ya da hazır Vücutbandları kullanın.




Dört şeridin hepsini ikiye katlayın ve ütöleyin.




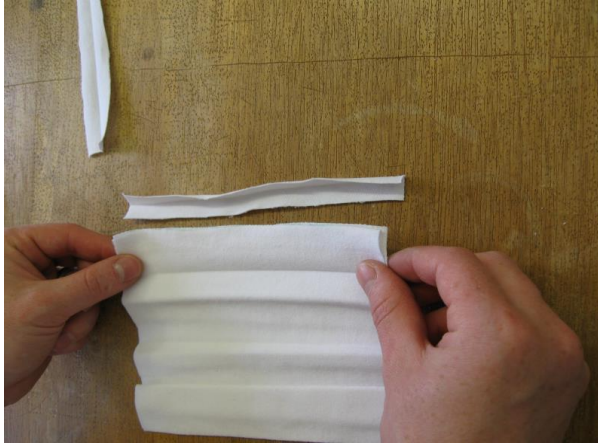


Beze kenar takviyelerini üstten ve alttan yerleştirin.

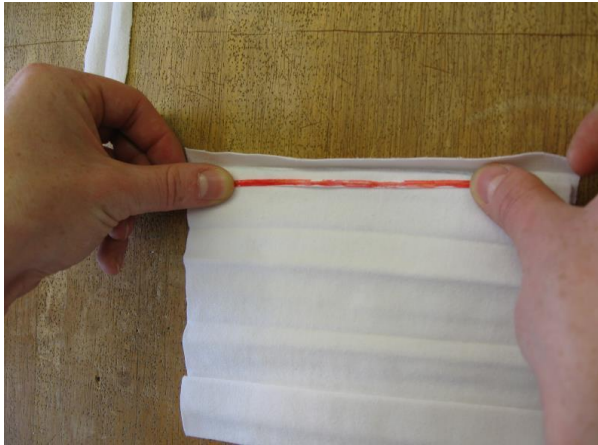

Teli üst kenar takviyesinin içine yerleştirin

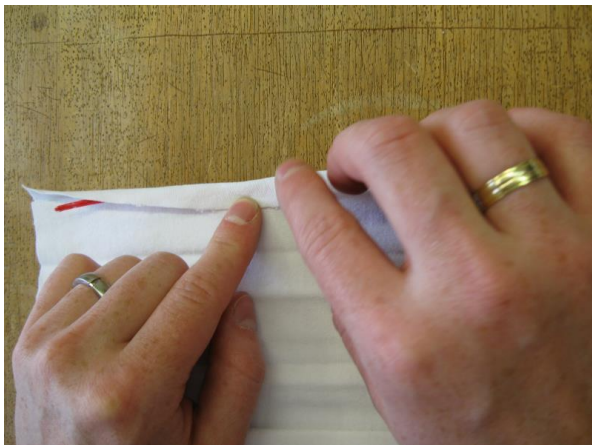


Bezi kenarlardan tutturun.

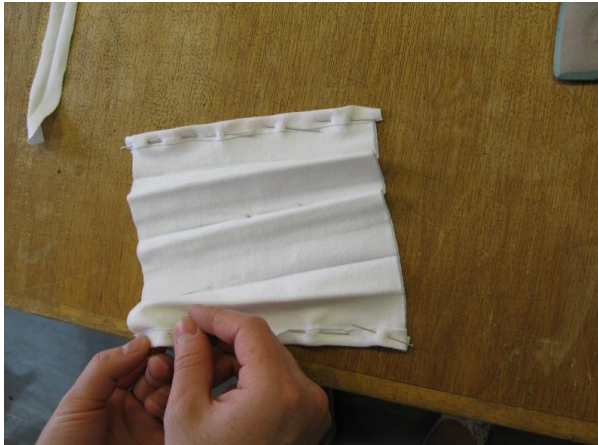

Kenar takviyelerini sabitleyin ve ...



...dikin.

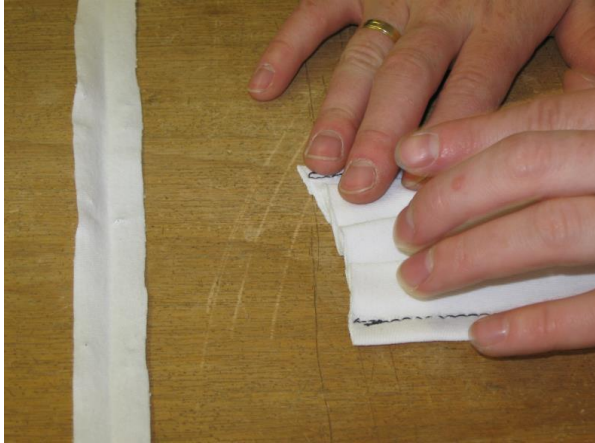


Kumaşın ütülenmiş kıvrımlarını birlikte katlayın ve her iki taraftaki kafa bantlarının ortasına yerleştirin.



Baş bantlarını sabitleyin ve ...



dikin.

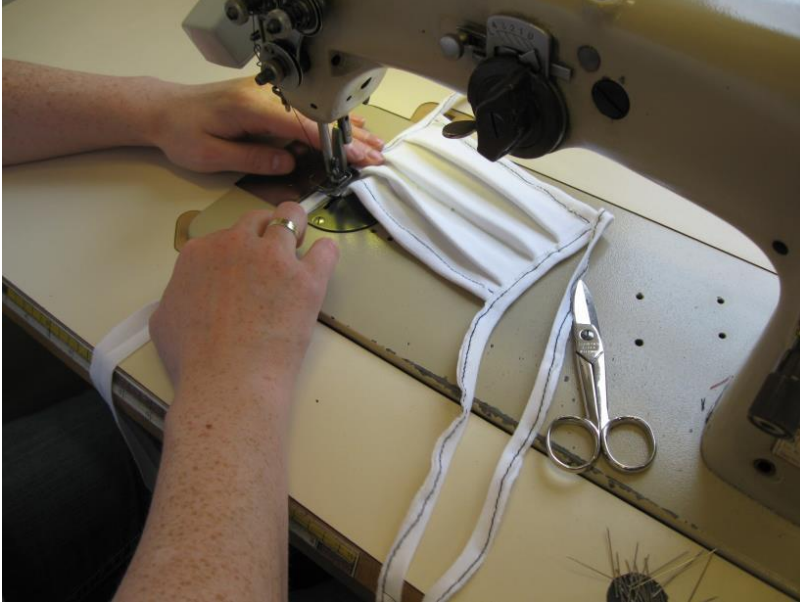

3. Yıkaneabilir BMNS'in bakımı ve temizliđi

Yıkaneabilir BMNS daima kuru depolanmalıdır. İlk kullanımdan önce BMNS yıkanmalıdır. Kullanımdan sonra, BMNS dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır ve mümkün olduđuunca dış yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır. Çıkarıldıktan sonra el yıkama yapılmalıdır.

Kullanılmış BMNS her kullanımdan sonra veya günde en az bir kez temizlenmelidir.

Çamaşır makinesinde 90°C'de yıkanabilir veya bir su banyosunda (5 dakika) ocakta kaynatılabilirler. BMNS daha sonra kurutulmalıdır.

4. Yükümlölük (Sorumluluk)

Açıkça belirtilir ki, Essen Şehri Belediyesi geçici ağız burun koruma maskesinin koruyuculuđu, üretimi veya uygun kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı veya diđer ilgili kişiler tarafından oluşan hayati, bedensel ya da sağıksal zararlarda Essen Şehri Belediyesinden herhangi bir şekilde tazminat talep edilemez.

Geçici ağız burun koruma maskesinin üretimi / kullanımı sadece kendi sorumluluğunuzdadır.

Robert Koch Enstitüsü'nde belirtilen hijyen düzenlemelerine, her durumda uyulması gerekmektedir.