

تعليمات الخياطة للواقى المؤقت - لحماية - الفم - الأنف

1.

واقى مؤقت - لحماية - الفم - الأنف (و ح ف أ) في حالة الجائحة

واقى الفم مصنوع يدويا بشكل كامل، لم يتم اختباره أو اعتماده. يكون الأمر بشكل مؤقت فقط، إذا لم تعد الأقنعة لحماية - الفم - الأنف المعتمدة ذو استعمال مرة واحدة متاحة، في حالة حدوث جائحة.


الإنتاج و الاستخدام يقع، بعد دراسة متأنية، تحت مسؤوليتك الخاصة.

يهدف ال (و ح ف أ) إلى تقليل انتشار قطرات من قبل مرتديها (حماية المريض / العزلة العكسية). لذلك فإنه لا يشكل حماية ذاتية ويعتمد في فعاليته على كثافة القماش المستخدم. يمكن أن يؤدي إضافة قماش غير منسوج و مقاوم للغليان، إلى زيادة كبيرة في الفعالية.

تنتقل الفيروسات التاجية (كورونا) على سبيل المثال، عن طريق قطرات و التي تحدث ضمن جملة أمور منها، عند التحدث، عند السعال او العطس و يمكن ان تصل إلى الأغشية المخاطية للأشخاص المتصلين بهم. من الممكن أيضا ان تصل القطرات إلى الأسطح و تلوثها. يمكن أن يؤدي كذلك الإتصال المباشر باليد مع الأسطح الملوثة بالإفرازات المحتوية على الفيروسات و الإتصال اللاحق بين الفم و الأنف، إلى انتقال العدوى.

من الممكن ارتداؤه ان يقلل من مسارات انتقال عدوى الاكليل (كورونا). من المنطقي ارتداء واقى مؤقت - لحماية - الفم - الأنف في كل اللقاءات، بشكل خاص مع الأشخاص المعرضين للخطر، لمنع انتشار القطرات على الأشخاص المحتكين بهم.


من أجل تزويد السكان بما يكفي من (و ح ف أ) في حالة حدوث جائحة، يتم إنشاء دليل للخياطة الذاتية للواقى المؤقت - لحماية - الفم - الأنف القابل للغسل.

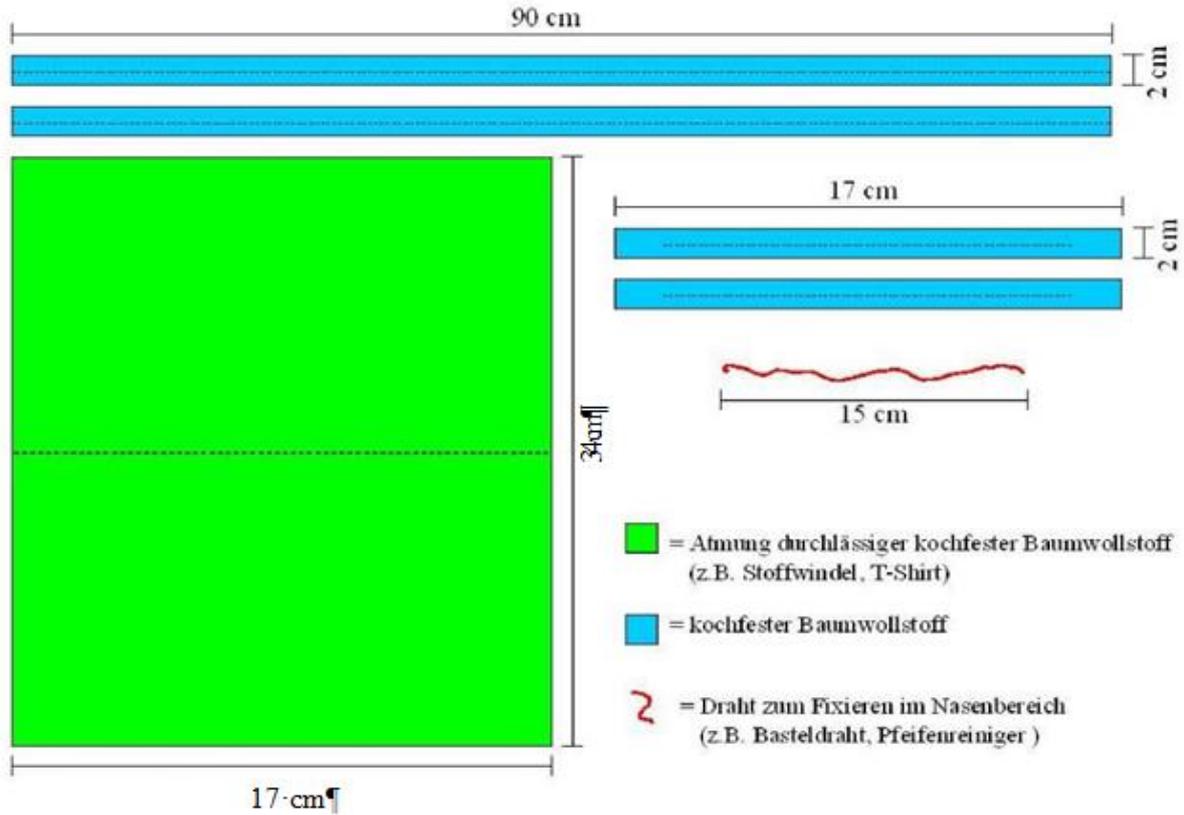


المواد التالية مطلوبة:

●	شريطين بطول 90 سم و عرض 2 سم من القماش (قطن مقاوم للغليان)
●	شريطين بطول 17 سم و عرض 2 سم من القماش (قطن مقاوم للغليان)
●	سلك رفيع و مرن بطول 15 سم (مثل الأسلاك الحرفية، منظف الغليون، أسلاك التثبيت من اكياس الثلجة)
●	17 سم × 34 سم قطعة قماش كبيرة تسمح بفاذ التنفس، مصنوعة من القطن المقاوم للغلي (مثل حفاظات القماش، قماش تيشيرت، قماش قطني خفيف)
	اختبار نفاذية التنفس: - قطعة القماش مرتين - اغلقها بإحكام حول الفم و الأنف - قم بالشهيق و الزفير اذا كان بالإمكان أخذ شهيق و زفير دون تقييد بالغ للتنفس، فإن المواد مناسبة لحماية الفم!


تخطيط و قص قطعة القماش.
34 × 17 سم الحجم.

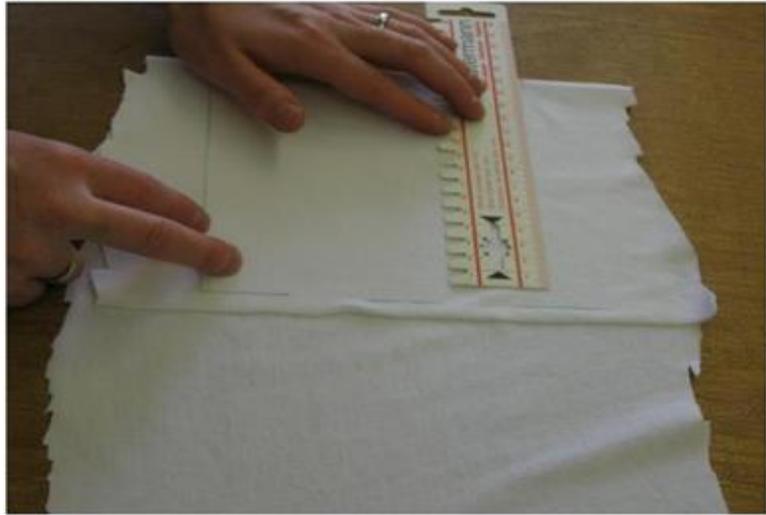


كوي و طوي القماش إلى
نصفين.

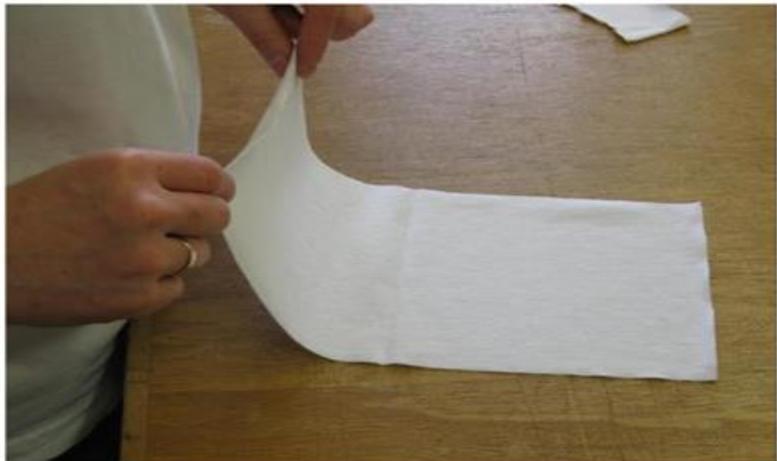


في القماش، كوي 3 طبقات
موزعة بالتساوي (عمق الطي
1,3 سم)

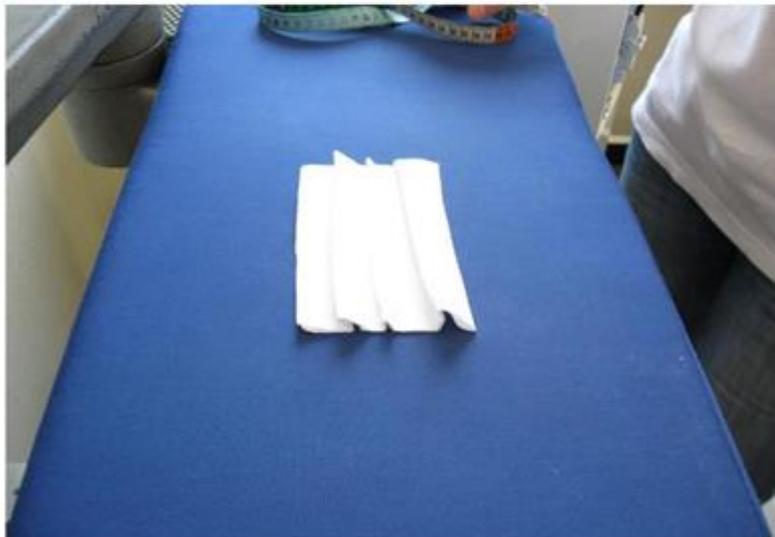

شريطان بطول 90 سم و عرض 2 سم (أربطة الرأس)
و قص شريطان بطول 17 سم و عرض 2 سم (تعزيز للحافة) من النسيج القطني.
احتمال لزوم تطهير الحواف.
أو استخدام نسيج مبرد جاهز.

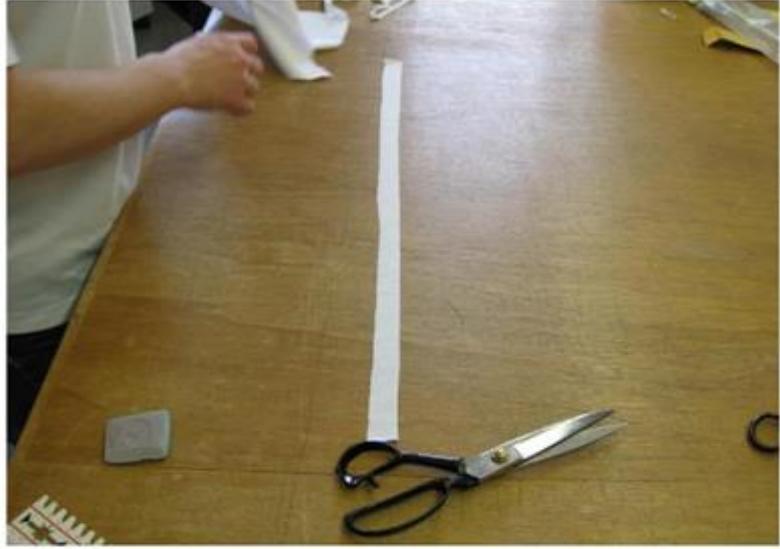


كوي جميع الشرائط الأربعة إلى النصف (شرائط منحدره)

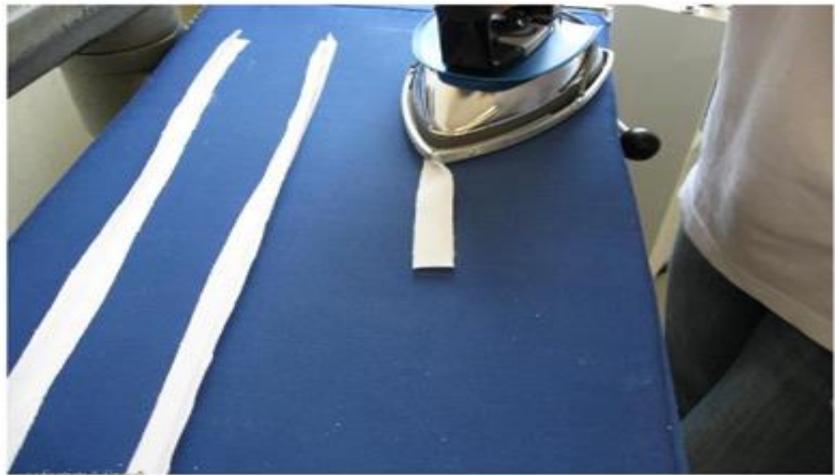

وضع القماش بداخل تعزيزات الحافة من الأعلى و الأسفل



ادخل السلك في الجزء العلوي من تعزيزات الحافة

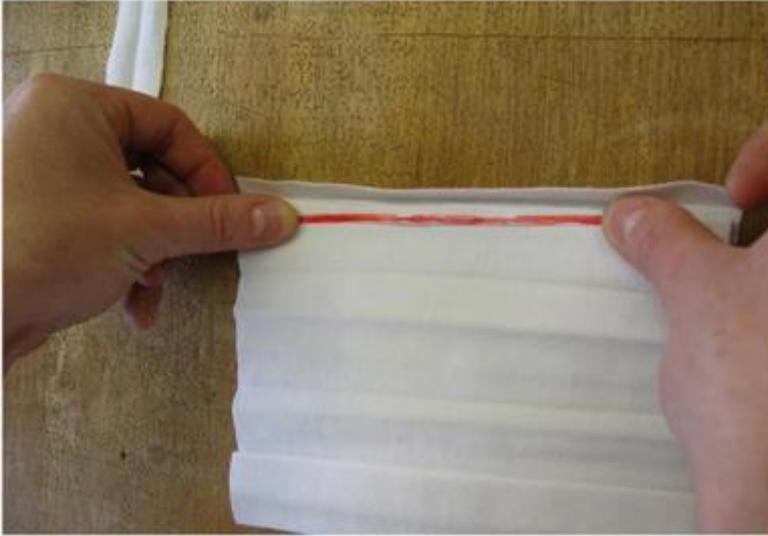


قم بلف القماش



S




تثبيت تعزيزات الحافة
و.....

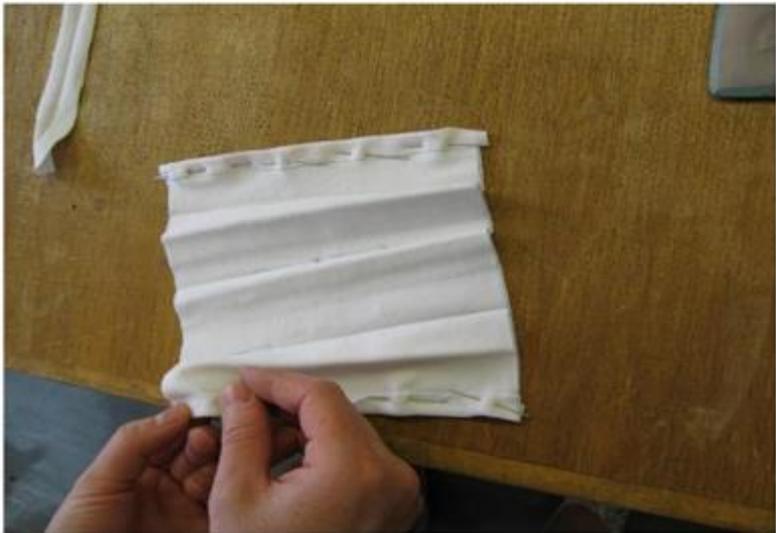

حياكته....



دمج الطيات المكوية من القماش
معا و وضعها في منتصف أربطة
الرأس على كلا الجانبين.

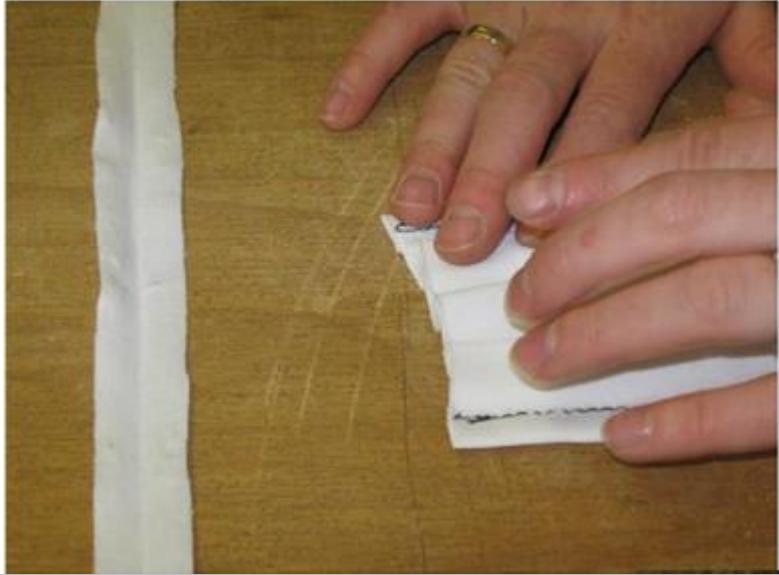

تثبيت أربطة الرأس و.....



...حياكته.





3. رعاية و تنظيف ال (و ح ف أ) القابل للغسل

بشكل أساسي يجب تخزين ال (و ح ف أ) القابل للغسل جافاً. بعد الاستخدام يجب إزالة ال (و ح ف أ) بحذر، مع عدم لمس السطح الخارجي. بعد نزعها يجب غسل اليدين جيداً.

يجب تنظيف ال (و ح ف أ) المستعمل بعد كل استخدام أو بالأحرى على الأقل مرة واحدة في اليوم.

يمكنكم إما غسلها عند 90 درجة مئوية في الغسالة أو غليها على الموقد في حمام مائي (لمدة 5 دقائق). لاحقاً يجب تجفيف ال (و ح ف أ).

4. إخلاء المسؤولية

يشار وبوضوح، إلى أن مدينة إيسن لا تتحمل أي مسؤولية عن فعالية أو تصنيع أو الاستخدام الصحيح للواقى المؤقت لحماية - الفم - الأنف. يتم استبعاد أي مطالبة بالتعويض اتجاه مدينة إيسن، عن الأضرار الناجمة بسبب إصابة في الحياة أو الجسم أو الصحة، بغض النظر عما إذا كانت من المستخدم أو من الشخص المقابل له.

التصنيع / الاستخدام للواقى المؤقت لحماية - الفم - الأنف يتم و بشكل حصري، على مسؤوليتك الخاصة.

ويشار إلى أنه بأي حال، يجب المراعاة لقواعد النظافة الصادرة من معهد روبرت كوخ.